
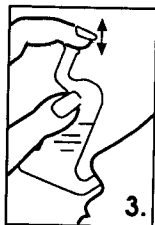


# Gebrauchsanweisung

**Nasendusche nach Fränkel • Nose rinse "Fränkel"**  
**Douchette de nez "Fränkel" • Irrigazione nasale "Fränkel"**

1. Flüssigkeit (Wasser mit oder ohne entsprechende Zusätze) über die Einfüllöffnung (kurzer Glasstutzen) in den Glashohlkörper geben, indem man die Einführöffnung (langer Glasstutzen) mit den Fingern verschlossen hält.
2. Danach Einfüllöffnung verschließen und den langen Glasstutzen vorsichtig in die Nase einführen.
3. Die Einlaufgeschwindigkeit durch Öffnen und Schließen der Einfüllöffnung regulieren.

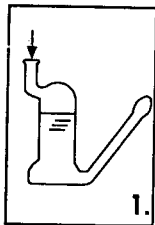

Best.-Nr.: 103500

PZN: 4596573



**Büttner-Frank GmbH**

Am Wolfsmantel 9-11 • 91058 Erlangen • Tel.: 09131/7905-0  
Fax: 09131/60 27 69 • e-mail: kundenservice@buettner-frank.de